

COOL LINER 2.0 PROTESLINER

Protesliner av gel i olika tjocklekar med utvändigt lycratyg för mindre friktion och slitage mot proteshyslan. Är hudvänlig och innehåller mineraloljebaserad gel som är vitamin A, D och E berikad.

Modeller:

- UNIFORM = Tunnare geltjocklek på baksidan för bättre sittkomfort. Formbar vid 65°C, behåll temperaturen i en timme, låt sedan kallna.
- TAPERED (konisk) = Konisk formad liner med tjockare gellager i botten. Formbar vid 65°C, behåll temperaturen i en timme, låt sedan kallna.

Båda modellerna finns i vanlig version eller VSC (Vertical Stretch Control). VSC = Förstärkt liner för aktiva patienter.

Finns med eller utan pinnkoppling.



Cool Liner




Cool Liner VSC

STORLEK / ARTIKELNUMMER

Tjocklek	Storlek	Form	COOL LINER		COOL LINER VSC		
			Utan pinnkoppling	Med pinnkoppling	VSC Utan pinnkoppling	VSC Med pinnkoppling	
3mm	3mm	Small	Uniform	315023001	315033001	* 315043001	* 315053001
	3mm	Medium	Tapered	315023032	315033032	* 315043032	* 315053032
	3mm	Medium	Uniform	315023002	315033002	* 315043002	* 315053002
	3mm	Medium +	Tapered	315023052	315033052	* 315043052	* 315053052
	3mm	Medium +	Uniform	315023042	315033042	315043042	315053042
	3mm	Large	Uniform	315023003	315033003	315043003	315053003
	3mm	Large +	Uniform	315023013	315033013	315043013	315053013
	3mm	X-Large	Uniform	315023004	315033004	315043004	315053004
6mm	6mm	Small	Uniform	315026001	315036001	315046001	315056001
	6mm	Medium	Tapered	315026032	315036032	315046032	315056032
	6mm	Medium	Uniform	315026002	315036002	315046002	315056002
	6mm	Medium +	Tapered	315026052	315036052	315046052	315056052
	6mm	Medium +	Uniform	315026042	315036042	315046042	315056042
	6mm	Large	Uniform	315026003	315036003	315046003	315056003
	6mm	Large +	Uniform	315026013	315036013	315046013	315056013
	6mm	X-Large	Uniform	315026004	315036004	315046004	315056004
9mm	9mm	Small	Uniform	315029001	315039001	* 315049001	* 315059001
	9mm	Medium	Tapered	315029032	315039032	* 315049032	* 315059032
	9mm	Medium	Uniform	315029002	315039002	315049002	315059002
	9mm	Medium +	Tapered	315029052	315039052	* 315049052	* 315059052
	9mm	Medium +	Uniform	315029042	315039042	315049042	315059042
	9mm	Large	Uniform	315029003	315039003	315049003	315059003
	9mm	Large +	Uniform	315029013	315039013	* 315049013	* 315059013
	9mm	X-Large	Uniform	315029004	315039004	* 315049004	* 315059004

* Special beställning, ej lagervara.

HUR MAN MÄTER OCH RÄKNAR UT RÄTT STORLEK

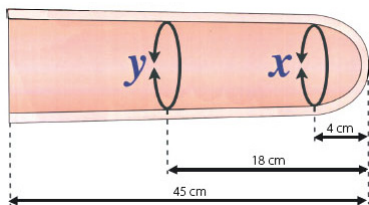

Steg 1. HITTA RÄTT MÅTT

Mät stumpens omkrets 4 cm från distala änden för att få fram ett x-värde.
Mät sedan stumpens omkrets 18 cm från distala änden för att få fram y-värdet.

UNIFORM STORLEKSTABELL

		Omkrets X (CM)																																		
		16,5	18	19	21	22	23	24	25,5	26,5	28	29,5	30,5	31,5	33	34	35	36,5	38	39,5	41	42	43	44,5	46	47	48	49,5	51	52	53	55				
21	Omkrets Y (CM)																																			
22	Omkrets Y (CM)																																			
23	Omkrets Y (CM)																																			
24	Omkrets Y (CM)																																			
25,5	Omkrets Y (CM)																																			
26,5	Omkrets Y (CM)																																			
28	Omkrets Y (CM)																																			
29,5	Omkrets Y (CM)																																			
30,5	Omkrets Y (CM)																																			
31,5	Omkrets Y (CM)																																			
33	Omkrets Y (CM)																																			
34	Omkrets Y (CM)																																			
35	Omkrets Y (CM)																																			
36,5	Omkrets Y (CM)																																			
38	Omkrets Y (CM)																																			
39,5	Omkrets Y (CM)																																			
41	Omkrets Y (CM)																																			
42	Omkrets Y (CM)																																			
43	Omkrets Y (CM)																																			
44,5	Omkrets Y (CM)																																			
46	Omkrets Y (CM)																																			
47	Omkrets Y (CM)																																			
48	Omkrets Y (CM)																																			
49,5	Omkrets Y (CM)																																			
51	Omkrets Y (CM)																																			
52	Omkrets Y (CM)																																			
53	Omkrets Y (CM)																																			
54,5	Omkrets Y (CM)																																			
56	Omkrets Y (CM)																																			
57	Omkrets Y (CM)																																			
58,5	Omkrets Y (CM)																																			
60	Omkrets Y (CM)																																			
61	Omkrets Y (CM)																																			
62	Omkrets Y (CM)																																			
63,5	Omkrets Y (CM)																																			
65	Omkrets Y (CM)																																			
66	Omkrets Y (CM)																																			

Steg 2. LÄS AV STORLEKSTABELL

Använd x-värdet och y-värdet du fick fram i steg 1 för att med hjälp av Uniform storlekstabell för få fram vilken storlek och form du behöver.

Om stumpen är konisk så att du inte finner någon lämplig storlek i Uniform storlekstabell se då i Tapered (konisk) storlekstabell.

TAPERED (KONISK) STORLEKSTABELL

		Omkrets X (CM)										
		16,5	18	19	21	22	23	24	25,5	26,5	28	29,5
21	Omkrets Y (CM)											
22	Omkrets Y (CM)											
23	Omkrets Y (CM)											
24	Omkrets Y (CM)											
25,5	Omkrets Y (CM)											
26,5	Omkrets Y (CM)											
28	Omkrets Y (CM)											
29,5	Omkrets Y (CM)											
30,5	Omkrets Y (CM)											
31,5	Omkrets Y (CM)											
33	Omkrets Y (CM)											
34	Omkrets Y (CM)											
35	Omkrets Y (CM)											
36,5	Omkrets Y (CM)											
38	Omkrets Y (CM)											
39,5	Omkrets Y (CM)											
41	Omkrets Y (CM)											
42	Omkrets Y (CM)											
43	Omkrets Y (CM)											
44,5	Omkrets Y (CM)											
46	Omkrets Y (CM)											



DISTRIBUTÖR:

Alfimed AB, Karbingatan 38

S-254 67 Helsingborg, Sweden

T: +46 70 375 22 55

E: info@alfimed.se, W: www.alfimed.se

PRODUCENT:

DAW Industries Inc San Diego, CA