

Koble ALFESS™ og fjernkontrollen med Bluetooth

1. Slå på ALFESS™


Begynn med å trykke på den runde knappen på frontpanelet i 2 sekunder.



2. Trykk på set/enter og power-knappen på fjernkontrollen samtidig.

a. Teksten "BT init. Kontakt" vises på displayet.

b. Etter noen sekunder vises to tydelige felt i gult og blått på displayet (se bilde i trinn 3).

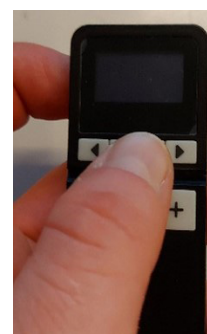

3. Slå av fjernkontrollen og vent i 5 sekunder.



4. Slå på fjernkontrollen igjen

Fjernkontrollen bytter til "sitte" eller "stå" modus.



5. Slå av begge enhetene med strømbryterne