

Vedlikehold av ALFES Slimline

Man bør vaske/rene de innebygde elektrodene i mansjetten for overflødig gel en gang i uken.

Når man skal vaske/rene elektrodene må man fjerne mansjetten fra stimenheten først.



1. Ta av ortosen



2. Finn de 2 trykknappene med fingrene og åpne dem



3. Åpne borrelåsen



4. Trekk stim-enheten ut av mansjetten

Når man har fjernet mansjetten fra stimenheten så holder man mansjetten under rennende lunkent vann, samtidig som man gnir ut den overflødig gelen som sitter i elektrodene. Mansjetten må deretter være *helt tørr* før den plasseres tilbake på stimenheten.



1. Se til at du holder stim-enheten og mansjetten samme vei



2. Tre stim-enheten inn i mansjetten



3. Bruk fingrene til å finne trykknappene og fest dem. Kontroller at trykknappene ikke sitter løst.



4. Fest borrelåsen

En mansjett skal vare i 1,5 – 2 måneder. Når man føler at man må øke strømstyrken eller syns at strømmen begynner å kjennes ubehagelig er det på tide å bytte mansjett.